

# One Step Graviditetstest

## Stav – Urintest

Wondfo - One Step HCG Urine Test  
REF W1-M5 (5 mm) Midstream

Denne One Step Graviditetstest er enkel og simpel at anvende og kan hurtigt teste for graviditet. Testen undersøger med meget stor nøjagtighed om der er human chorion gonadotropin (HCG) i kvindens urin.

HCG vil forekomme, hvis kvinden er gravid. Testen er i stand til at forudsige graviditet så tidligt som første dag efter at menstruationen er udeblevet. Testen er kun til hjemmebrug og kun til udvortes brug.

### Testen og graviditetshormonet (HCG):

Når ægget er blevet befrugtet vil det allerede få dage efter begynde at danne human chorion gonadotropin, som i daglig tale kaldes for graviditetshormonet, forkortet til HCG.

Som regel kan HCG opdages i urinen 6-15 dage efter befrugtningen er sket, men hvornår testen udviser et positivt resultat afhænger bl.a. af hvor stor en mængde HCG, kvinden udskiller i sin urin.

### Gode råd inden du tester:

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden testen udføres.

Testen kan udføres hele døgnet, men et mere præcist resultat kan opnås ved at udføre testen om morgenen, hvor HCG hormonet er mest koncentreret.

### Indhold i foliepakningen

- Selve graviditetstesten.
- Pose med fugtoptagende materiale - Må ikke spises og skal holdes utilgængeligt for børn.

### Hvad skal du ellers bruge?

- Evt. en ren og tør beholder / container til at opsamle urin i
- Et ur med sekundviser

### Sådan udføres testen:

1. Åbn foliepakningen og tag testen ud. Foliepakningen åbnes hvor der er et lille hak på siden af foliepakningen.

2. Hold om testens ende med den ene hånd, og brug den anden hånd til at tage hættten af. Du vil nu kunne se den absorberende del af testen.

3. Peg den absorberende del af testen nedad, og sæt den ind i urinstrålen i mindst 3 sekunder, sådan at du er sikker på, at den bliver tilstrækkelig våd. Sørg for at der kun kommer urin under det område som er markeret med en pil.



Alternativt kan urinen opsamles i en tør ren beholder. Herefter holdes testen absorberende del ned i urinen i omkring 3-4 sekunder.

4. Sæt så hættten på testen igen, og læg den på en ren ikkeabsorberende overflade.

5. Vent på at kontrolstregen og eventuelt teststregen dukker op. Afhængigt af mængden af HCG hormonet i urinen kan et positivt resultat ses efter 40 sekunder, men for at opnå et korrekt resultat, skal testen have den fulde reaktionstid på 5 min.

**VIGTIGT!** Resultatet af testen skal aflæses efter maksimalt 5 minutter. Se bort fra eventuelle ændringer efter dette tidspunkt.

### Aflæsning af resultatet:

Testen holdes med hættten pegende til venstre. I midten af aflæsningsvinduet vil resultatet af testen komme til syne.



Teststregen er placeret over **T** og kontrolstregen er over **C**.

### Positiv test (nr. 1)

Hvis der kommer 2 streger frem i aflæsningsvinduet er testen positiv. Testen har fundet HCG hormon i urinen, og det betyder, at du med stor sandsynlighed er gravid.

N.B. Såfremt teststregen kun er svagt farvet, så anbefales det at foretage en ny test efter 48 timer.

### Negativ test (nr. 2)

Hvis der kun kommer en kontrolstreg frem i aflæsningsvinduet er testen negativ.

Hvis din menstruation fortsat udebliver eller du stadig føler dig gravid, så prøv at udføre en ny test. HCG hormonet fordobles som regel efter ca. 2-3 dage, så derfor kan testen godt blive positiv fra den ene dag til den anden.

### Ugyldig test (nr. 3 og 4)

Hvis der ikke kommer nogen kontrolstreg frem (nr. 3) eller der kun kommer en teststreg (nr. 4) er testen ugyldig og bør smides væk. Udfør en ny test, og følg brugsanvisningen omhyggeligt.

Frømm kommer denne test også med et ugyldigt resultat, bør du kontakte forhandleren og oplyse LOT nr., som er trykt på foliepakningen.

### Testens begrænsninger

- Som det er med en hver diagnostisk procedure bør en bekræftende diagnose af eventuel graviditet udføres af en læge.

- Hvis en urin prøve er for tynd (udvandet) kan indholdet af HCG vise sig ikke at være repræsentativt. Hvis man stadig tror man er gravid, skal man tage en ny test 48 timer senere.

- Lavt indhold af HCG i den meget tidlige graviditet kan også give et negativt resultat. I dette tilfælde, skal man teste igen efter 48 timer.

- Forhøjet niveau af HCG kan også blive forårsaget af enkelte andre ting end graviditet. Derfor bør tilstedeværelsen af HCG i urinen kun bruges til en diagnose af graviditet såfremt de andre mulige betingelser ikke er opfyldt.

- En normal graviditet kan ikke skelnes fra en graviditet uden for livmoderen baseret på HCG niveauer alene. Spontan abort kan også forårsage fortolkningsvanskeligheder af test resultater.

- Sterilitets behandling - baseret på HCG - kan forårsage falske resultater. Konsulter venligst egen læge.

### Vigtig information!

- Testen er kun beregnet til in vitro diagnostik.

- Åben kun foliepakningen lige inden testen skal anvendes

- Opbevar foliepakningen utilgængelig for børn

- Bortskaf testen sammen med normalt husholdningsaffald

- Anvend ikke testen hvis foliepakningen er beskadiget

- Testen kan ikke genbruges

- Testen er kun til udvortes brug. Testen må ikke sluges

### Spørgsmål & Svar

**Der er en stor farveforskel mellem kontrolstregen på de forskellige tests jeg har udført. Er der en årsag til dette?**

Nej. Forskellen på farven på kontrolstregen har ingen betydning for resultatet.

**Er det muligt at aflæse resultatet senere end 5 minutter efter testens gennemførelse?**

Testens resultat skal senest være aflæst efter at der er gået 5 minutter for at få et mest korrekt resultat. En positiv test kan vise resultatet i flere dage, mens et negativt resultat kan ændre sig til et falsk positivt resultat, når der er gået nogle minutter efter at resultatet skulle være aflæst. Det er derfor altid bedst at aflæse resultatet inden der er gået 5 minutter, for at få det mest korrekte resultat.

**Testen viser et positivt resultat. Hvad skal jeg gøre?**

Hvis testen er positiv, skal du kontakte din læge, som kan fortælle dig mere om, hvordan du skal forholde dig til din graviditet.

### Testen er negativ, men min menstruation er udeblevet?

Er din menstruation udeblevet og test resultatet negativt, så skal du foretage en ny test efter ca. 2-3 dage, hvis du stadig har mistanke om graviditet. Udebliver din menstruation stadig, så kontakt din læge.

### Testen viser ingen kontrolstreg.

Hvis kontrolstregen på testen ikke viser sig inden 5 minutter, er testen ikke udført korrekt. Dette kan skyldes, at der er brugt for meget eller for lidt urin. Du skal foretage en ny test igen, for at få et korrekt resultat.

### Hvordan kan medicin eller sygdom påvirke resultatet?

Læs altid producentens instruktioner til eventuel medicin du indtager, inden du gennemfører testen.

### En pink baggrund og vertikale streger kom til syne i resultatområdet af testen i løbet af test perioden. Betyder det noget?

Nej. Hver urinprøve vil variere i dets kemiske sammensætning lige som luft fugtighed i rummet hvor testen udføres. Sådanne variationer i fysiske betingelser kan forårsage den pink - rosa baggrundsfarve men vil ikke have nogen indflydelse på testresultaterne. Så længe at kontrolstregen kommer til syne inden for 5 minutter så virker testen korrekt.

### Fabrikant:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.  
Wondfo Sciotech Park  
South China University Of Technology, Guangzhou,  
Kina

### Autoriseret repræsentant:

Qarad b.v.b.a.  
Volmolenheide 13  
B-2400 Mol, Belgium



Beskyttes mod sollys



Opbevares mellem 4 og 30°C



Opbevares tørt



Kan ikke genbruges



Kun til in vitro-diagnostisk brug



Producent



Autoriseret repræsentant i EU



OBS! Læs brugsanvisning for korrekt brug



Udløbsdato



0537