

One Step Graviditetstest

Strimmel – Urintest

Wondfo – One Step HCG Urine Test - Strip
REF W1-S3

Denne One Step Graviditetstest er enkel og simpel at anvende og kan hurtigt teste for graviditet. Testen undersøger med meget stor nøjagtighed om der er human chorion gonadotropin (HCG) i kvindens urin. HCG vil forekomme, hvis kvinden er gravid.

Testen er i stand til at forudsige graviditet så tidligt som første dag efter at menstruationen er udeblevet. Testen er kun til hjemmebrug og kun til udvortes brug.

Testen og graviditetshormonet (HCG):

Når ægget er blevet befrugtet vil det allerede få dage efter begynde at danne human chorion gonadotropin, som i daglig tale kaldes for graviditetshormonet, forkortet til HCG.

Som regel kan HCG opdages i urinen 6-15 dage efter befrugtningen er sket, men hvornår testen udviser et positivt resultat afhænger bl.a. af hvor stor en mængde HCG, kvinden udskiller i sin urin.

Gode råd inden du tester:

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden testen udføres. Testen kan udføres hele døgnet, men et mere præcist resultat kan opnås ved at udføre testen om morgenen, hvor HCG hormonet er mest koncentreret.

Indhold i foliepakningen:

- Selve graviditetstesten.
- Pose med fugtoptagende materiale - Må ikke spises og skal holdes utilgængeligt for børn.

Hvad skal du ellers bruge?

- Evt. en ren og tør beholder / container til at opsamle urin i
- Et ur med sekundviser

Testens begrænsninger

- Som det er med en hver diagnostisk procedure bør en bekræftende diagnose af eventuel graviditet udføres af en læge.
- Hvis en urin prøve er for tynd (udvandet) kan indholdet af HCG vise sig ikke at være repræsentativt. Hvis man stadig tror man er gravid, skal man tage en ny test 48 timer senere.
- Lavt indhold af HCG i den meget tidlige graviditet kan også give et negativt resultat. I dette tilfælde skal man teste igen efter 48 timer.
- Forhøjet niveau af HCG kan også blive forårsaget af enkelte andre ting end graviditet. Derfor bør tilstedeværelsen af HCG i urinen kun bruges til en diagnose af graviditet såfremt de andre mulige betingelser ikke er opfyldt.
- En normal graviditet kan ikke skelnes fra en graviditet uden for livmoderen baseret på HCG niveauer alene. Spontan abort kan også forårsage fortolkningsvanskeligheder af test resultater.
- Sterilitets behandling - baseret på HCG - kan forårsage falske resultater. Konsulter venligst egen læge.

Sådan udføres testen:

1. Testen og urinen skal være omkring stuetemperatur (15 °C til 30 °C)

2. Tis i en ren tør beholder. Den bedste måde at opsamle urinen på er at holde skålen i midten af urinstrålen.

3. Åbn nu foliepakningen med testen og tag testen ud. Foliepakningen åbnes dér hvor der er et lille hak på siden af foliepakningen.

4. Hold nu testen ned i urinen. Pilen som er tegnet på testen skal vende ned af.

VIGTIGT: Urinen må ikke overstige max (maksimum) linjen da testen så kan være misvisende.

5. Tag testen op når der er gået 3 sekunder og læg testen på en tør, ren overflade, som ikke er sugende - f.eks. foliepakningen.

6. Vent på at de farvede streger dukker op. Afhængigt af hormon mængden i urinen kan et positivt resultat dukke op efter bare 40 sekunder, men for at være sikker på testens resultat, skal testen have den fulde reaktionstid på 5 min

VIGTIGT! Resultatet af testen skal aflæses efter maksimalt 5 minutter. Se bort fra eventuelle ændringer efter dette tidspunkt.

Aflæsning af resultatet:

Positiv test (gravid)



Hvis der kommer 2 streger frem på testen, er testen positiv. Testen har fundet HCG hormonet i urinen, og det betyder, at du med stor sandsynlighed er gravid.

Farveintensiteten på teststregen kan variere afhængigt af koncentrationen af HCG hormonet.

Hvis teststregen er svagt farvet, så anbefales det at foretage en ny test inden for 48 timer.

Negativ test (ej gravid)



Hvis der kun fremkommer én streg, så betyder det at der ikke er tegn på graviditet.

Ugyldig



Hvis hverken teststregen eller kontrolstregen fremkommer, eller hvis kun teststregen fremkommer, så er resultatet ugyldigt. En ny test bør anvendes. Hvis denne test også fremkommer med et ugyldigt resultat bør forhandleren kontaktes og testens LOT nr. oplyses.

Vigtig information!

- Testen er kun beregnet til in vitro diagnostik
- Åben kun foliepakningen lige inden testen skal anvendes
- Opbevar foliepakningen utilgængelig for børn
- Bortskaf testen sammen med normalt husholdningsaffald
- Anvend ikke testen, hvis foliepakningen er beskadiget
- Testen kan ikke genbruges
- Testen er kun til udvortes brug
- Testen må ikke sluges

Opbevaring & holdbarhed:

- Foliepakningen opbevares mellem 4 °C til 30 °C i den lukkede foliepakning.
- Testens holdbarhed er stemplet på foliepakningen. Holdbarhed er angivet som år / måned. Efter denne dato skal testen bortskaffes.
- Testen skal opvares tørt og beskyttes mod sollys.

Spørgsmål & Svar:

Der er en stor farveforskel mellem kontrolstregen på de forskelle test jeg har udført. Er der en årsag til dette?

Nej. Forskellen i farven på kontrolstregen har ingen betydning for resultatet.

Er det muligt at aflæse resultatet senere end 5 minutter efter testens gennemførelse?

Testens resultat skal senest være aflæst efter at der er gået 5 minutter for at få det mest korrekte resultat. En positiv test kan vise resultatet i flere dage, mens et negativt resultat kan ændre sig til et falsk positivt resultat når der er gået nogle minutter efter at resultatet skulle være aflæst. Det er derfor altid bedst at aflæse resultatet inden der er gået 5 minutter for at få det mest korrekte resultat.

Testen viser et positivt resultat. Hvad skal jeg gøre?

Hvis testen er positiv, skal du kontakte din læge, som kan fortælle dig mere om, hvordan du skal forholde dig til din graviditet.

Testen er negativ, men min menstruation er udeblevet?

Er din menstruation udeblevet og test resultatet negativt, så skal du foretage en ny test efter ca. 2-3 dage, hvis du stadig har mistanke om graviditet. Udebliver din menstruation stadig, så kontakt din læge.

Testen viser ingen kontrolstreg.

Hvis kontrolstregen på testen ikke viser sig inden 5 minutter, er testen ikke udført korrekt. Dette kan skyldes, at der er brugt for meget eller for lidt urin. Du skal foretage en ny test igen for at få et korrekt resultat.

Hvordan kan medicin eller sygdom påvirke resultatet?

Læs altid producentens instruktioner til eventuel medicin du indtager, inden du gennemfører testen.

En pink baggrund og vertikale streger kom til syne i resultatområdet af testen i løbet af test perioden. Betyder det noget?

Nej. Hver urinprøve vil variere i dets kemiske sammensætning lige som luft fugtighed i rummet hvor testen udføres. Sådanne variationer i fysiske betingelser kan forårsage den pink - rosa baggrundsfarve men vil ikke have nogen indflydelse på testresultaterne. Så længe at kontrolstregen kommer til syne inden for 5 minutter så virker testen korrekt.

Fabrikant:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
Wondfo Scientech Park
South China University Of Technology,
Guangzhou, Kina

Autoriseret repræsentant:

Qarad b.v.b.a.
Volmolenheide 13
B-2400 Mol, Belgium



Beskyttes mod sollys



Opbevares mellem 4 og 30°C



Opbevares tørt



Kan ikke genbruges



Kun til in vitro-diagnostisk brug



Producent



Autoriseret repræsentant i EU



OBS! - Læs brugsanvisningen for korrekt brug



Udløbsdato



0537