

Babyplan® Tidlig Graviditetstest Stav

Brugsanvisning



Når store drømme skal gå i opfyldelse, er det ofte de små ting, der gør forskellen. Lad Babyplan hjælpe dig med at øge dine muligheder for at blive gravid.

Babyplan.dk

Betydning af symboler på emballagen

	Beskyttes mod sollys		Kan ikke genbruges
	Opbevares tørt		Udløbsdato
	Opbevares mellem 4°C og 30°C		Bemærk! Læs vejledningen for korrekt brug af produktet
	Kun til in-vitro diagnostisk brug		Batch kode
	Katalognummer		Advarsel! Se brugsanvisningen
	Indeholder tilstrækkelig til <n> test		Europæisk repræsentant
	Importør		

One Step HCG Urine Test

 W1-M14 10mlU



 **Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.**

No. 8, Lizhishan Road, Science City Luogang District
510663 Guangzhou, Kina
Tlf: 0086-20-8711-1194
E-mail: sales@wondfo.com.cn

 **Qarad BV**
Cipalstraat 3
2440 Geel
Belgien

 E-Invasion A/S
Artillerivej 86, 1
2300 København S
Danmark
E-mail: info@babyplan.dk

resultat skal senest være aflæst inden der er gået 5 minutter. En positiv test kan vise resultatet i flere dage, mens et negativt resultat kan ændre sig til falsk positivt resultat, når der er gået nogle minutter efter at resultatet skulle være aflæst. Det er derfor altid bedst at aflæse resultatet inden der er gået 5 minutter og så smide testen ud for at undgå forvirring.

En pink baggrund og vertikale streger kom til syne i resultatområdet af testen i løbet af testperioden. Betyder det noget?

Nej. Hver urinprøve vil variere i dets kemiske sammensætning lige som luftfugtigheden i rummet hvor testen udføres. Sådanne variationer i fysiske betingelser kan forårsage de vertikale streger og/ eller den pink – rosa baggrundsfarve, men vil ikke have nogen indflydelse på testresultaterne. Så længe kontrolstregen kommer til syne inden for 5 minutter, så virker testen korrekt.

Bibliografi

- Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
- Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

kvinder, er Babyplan Tidlig Graviditetstest i stand til at forudsige graviditet så tidligt som fra den dag menstruationen forventes. Testen kan bruges for at detektere graviditet tidligere, men med lavere nøjagtighed.

Følsomhed og nøjagtighed

Følsomhed:

Babyplan Tidlig Graviditetstest reagerer på hCG når koncentrationen af hCG er 10 mIU/ml eller mere.

Nøjagtighed:

Babyplan Tidlig Graviditetstests pålidelighed er blevet fastslået ved laboratorietest med kendte niveauer af luteiniserende hormon (hLH), follikelstimulerende hormon (hFSH) og skjoldbruskkirtel stimulerende hormon (hTSH). Negative resultater blev opnået fra alle test som blev udført med 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH og 1 000 µIU/ml hTSH.

Spørgsmål og svar

Der er stor farveforskel mellem kontrolstregen på de forskellige test jeg har udført. Betyder det noget?

Nej, forskellen på farven på kontrolstregen har ingen betydning for resultatet.

Er det muligt at aflæse resultatet senere end 5 minutter efter testens gennemførelse?

Testens

niveau af hCG. Hvis man stadig tror man er gravid, skal man tage en ny test inden for 48 timer.

- Lav koncentration af hCG i en meget tidlig graviditet kan give et negativt resultat. I dette tilfælde skal man tage en ny test inden for 48 timer.
- Forhøjet niveau af hCG kan forårsages af enkelte andre årsager end graviditet. Derfor bør tilstedeværelsen af hCG i urinen ikke bruges til at diagnosticere graviditet med mindre disse andre årsager ikke er opfyldt.
- En normal graviditet kan ikke skelnes fra en graviditet uden for livmoderen baseret på hCG niveauer alene. Spontan abort kan også give fortolkningsvanskeligheder af test resultater.
- Sterilitetsbehandling baseret på hCG kan forårsage falske resultater. Kontakt venligst egen læge.
- Denne test er en kvalitativ screeninganalyse. Den er ikke udviklet til at bestemme den kvantitative koncentration af hCG.
- Enheden er kun egnet til human urin test.
- Uren urinprøve eller interfererende stoffer i urinen kan medføre falsk resultat.
- Uren testenhed kan medføre falsk resultat.

Forventede resultater

Et negativt resultat kan forventes fra sunde ikke gravide kvinder og sunde mænd. Selvom hCG niveauerne kan variere hos normale tidligt gravide

kontrolzone regionen hvis testen er udført korrekt.

Forholdsregler

- Dette sæt er kun til ekstern brug. Lad være med at sluge det.
- Smid det ud efter brug. Stav testen kan ikke bruges mere end 1 gang.
- Brug ikke test sættet efter sidste holdbarhedsdato.
- Brug ikke sættet hvis foliepakningen er punkteret eller ikke forseglet ordenligt.
- Hold testen uden for børns rækkevidde.

Opbevaring og Stabilitet

- Opbevar mellem 4°C og 30°C i den forseglede foliepakning indtil udløbsdato.
- Undgå direkte sollys, fugt og varme.
- Kan ikke nedfryses.
- Det er bedst først at åbne foliepakningen lige inden testen tages.

Begrænsninger

- Som med enhver diagnostisk procedure så skal en bekræftet graviditets diagnose kun foretages af en læge efter at have evalueret alle kliniske samt laboratorie resultater.
- Hvis en urinprøve er for udvandet (dvs. lav specifik gravitet) indeholder den ikke et repræsentativt

Hvad skal man gøre når man kender resultatet?

Hvis resultatet er positivt (2 streger)

Kontakt din læge, som bør bekræfte din graviditet efter at have evalueret alle kliniske samt laboratorie resultater. Under visse omstændigheder kan testen give et falsk positivt resultat. Din læge vil også give dig yderlige information og rådgivning om din graviditet. Se også "begrænsninger".

Hvis resultatet er negativt (1 streg)

Hvis du stadig mener der er chance for du er gravid (f.eks. ved stadig udebleven menstruation), kan du tage en ny test et par dage senere. Hvis testen stadig er negativ, så kontakt din læge. Se også "begrænsninger".

Hvordan virker den?

Human chorionic gonadotropin (hCG) er et hormon som produceres af det befrugtede æg kort efter befrugtningen og som udskilles i urinen. Graviditetstesten indeholder antistoffer som specifikt reagerer med dette hormon. Når en urinprøve påføres stavtesten, får kapillære kræfter prøven til at bevæge sig op af membranen. Når hCG i prøven når testzone regionen på membranen dannes der en farvet linje. Hvis den farvede linje ikke dannes, tyder det på et negativt resultat. Som en kontrol procedure dannes der en farvet linje ved

Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen af human chorionic gonadotropin ("hCG") som forefindes i urinen i den tidlige graviditet. Kun til In vitro selv test. Kun til ekstern brug.



Har du husket folsyre?

Sådan udføres testen

Indhold af testsættet

- En foliepakke med en stav test og en pose med fugtoptagende materiale. Posen er kun til opbevaringsformål og skal ikke bruges som del af test procedurene.
- Brugsvejledning.

Hvad har du ellers brug for?

- Et rent, tørt, plastik- eller glasbæger til opsamling af en urinprøve.
- En timer (et ur).


Hvornår skal testen tages?

Enhver urinprøve kan bruges til at teste for graviditet, men **den første morgenurin** er optimal fordi der forefindes den **højeste koncentration af hCG**.



Betyder vigtig information

Sådan udføres testen

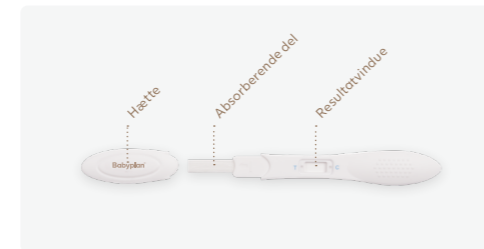

1. For at begynde at teste, så åbnes først foliepakningen ved at trække ved det lille hak på siden af posen. Tag stav testen ud.
2. Hold om testens ende med den ene hånd, og brug den anden hånd til at tage hættens af med. Du vil nu kunne se den absorberende del af testen.



3. Peg den absorberende del af testen ned ad og sæt den ind i urinstrålen i mindst 10 sekunder så du er sikker på den bliver tilstrækkelig våd.*

Alternativt kan urinen opsamles i en ren tør beholder. Herefter holdes testens absorberende del ned i urinen i mindst 5 sekunder.



*Sørg for der kun kommer urin under det område som er markeret med en pil




4. Sæt så hættens på testen igen og vent på de farvede linjer kommer frem. Positive resultater kan aflæses så tidligt som på 1 minut. Dog for at kunne bekræfte et negativt resultat er **den komplette reaktionstid på 3 minutter nødvendig**.




Aflæs ikke resultatet efter mere end 5 minutter.

Hvordan aflæses resultaterne?

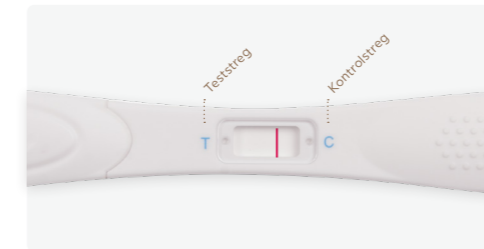

Negativ (ikke gravid):

Der kommer kun en streg frem i kontrolzonen Ingen linjer i testzonen. Dette indikerer at der ikke er tegn på graviditet.

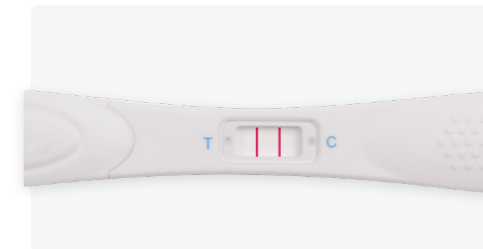

Positiv (gravid):

Adskilte farvede streger fremkommer i kontrol og testzonerne. Dette indikerer at du er gravid. Farveintensiteten af testens streger kan variere da forskellige faser af graviditet har forskellig koncentration af hCG hormonet.



Ugyldig:

Ingen synlige streger eller der er en synlig streg i testzonen men ikke i kontrolzonen. Tag en ny test. Hvis denne test også fejler, så kontakt venligst distributøren eller den butik hvor du købte produktet og oplys LOT nummeret.



Hvis farven på streger i testzonen er svag, så anbefales det at tage testen igen i løbet af 48 timer.